

Gaura Silmare Pulse120 使用前閱讀



掃描查閱開箱介紹

注意事項

- 水質要求：請使用**純水**或**蒸餾水**，水中總溶解固體（TDS）濃度不得超過 5mg/L（約 10 $\mu\text{S}/\text{cm}$ 以下）。建議使用 蒸餾水 為最佳選擇。
- 防塵蓋帽：使用時，請務必**移除**氫氣與氧氣出口的**防塵蓋帽**。此舉確保系統在運作中可正常釋壓，避免壓力堆積。（蓋帽可收納至機體背面）
- 長期末使用時：若機器長時間（如數個月）不使用，也無須排水，可維持質子交換膜濕潤，下次開機時可直接使用，無需再次活化。

第一次使用

- 開箱說明：機器內部有少量水分屬**正常現象**。每台主機出廠前皆經過 48 小時連續測試，且質子交換膜（PEM）需**保持濕潤**狀態確保性能穩定，因此保留少許水份出廠。
- 加入純水活化：在接通電源的情況下，請於主機中加入純水或蒸餾水以進行電解槽活化，水位請**勿超過 Max 水位線**，若超過會導致氫氧出口因壓力溢水，若超過請排出多餘水。
- 氫水棒前處理：氫水棒於出廠前經乾燥處理，首次使用前請先**浸泡純水數分鐘**，可降低氣道阻力、提升氣體流通效率，即可製作氫水。

常見狀況與排除方式


- 恢復出廠設定：任何情況下，可**拔除主機電源後再重新接通電源**，即可恢復原廠參數。
- 水質異常（TDS 紅燈亮）：代表**水質不佳**。請由底部排水孔**排空舊水**後補充新的純水或蒸餾水。排水時應打開注水孔消除負壓，確保排水順暢。
- 缺水警示：當螢幕出現缺水符號（紅燈亮）時，請補充符合規範的純水或蒸餾水。
- 水泵異音（氣結現象）：若機體曾受到搖晃，內部管路可能產生氣結，導致水泵出現「空轉聲」。雖不影響正常運作，但若想消除異音，可由底部排水約 2-3 秒，即可排出氣泡並恢復安靜運轉。

日常使用建議

- 氫氣體吸入：每次使用建議 15~30 分鐘以上，體內濃度可達峰值。使用時間依照臨床研究無上限值，可長時間使用。
- 氫水飲用：適量飲用與平日飲用水量相同即可。若為限水患者，遵照醫囑限制飲用水量。
- 設備保養：應減少直接日照，外觀積灰塵使用乾淨濕抹布清潔及軟毛刷清潔散熱孔，水箱內無須清潔僅需遵照 TDS 指式燈換水即可。

關鍵字及翻譯

- 蓋帽移除：Oxygen 氧氣接口、Hydrogen 氫氣接口。
- 水位視窗：Max 最高水位線。
- Mode 模式按鍵：Pulse 脈衝燈號、Normal 連續燈號。
- Power 電源按鍵：Auto 自動脈衝燈號、1h 限一小時燈號、2h 限二小時燈號。

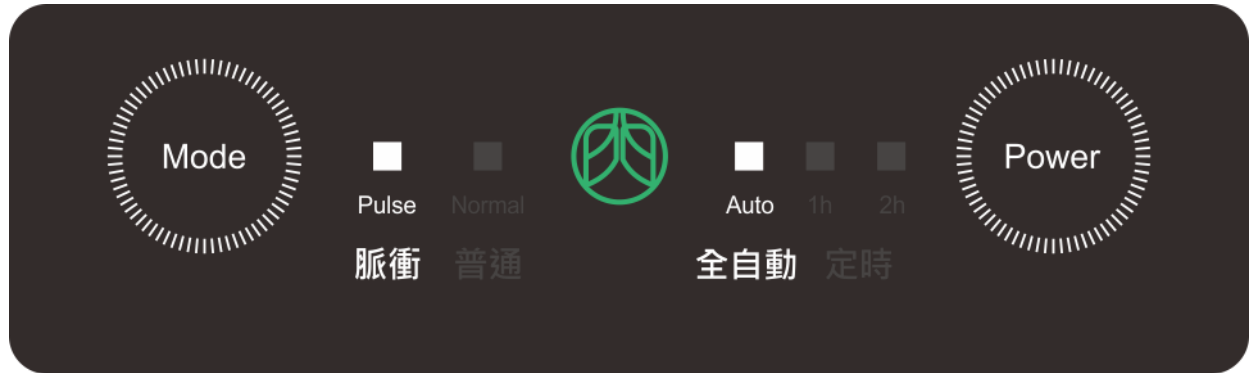

模式功能說明

- Pulse 模式 (脈衝模式): 採用間歇式專利供氣控制技術，可在同等時間內提升氫氣輸出效率，氫氣劑量相較連續模式最高可達 3 倍。此模式同時可減少電解單元負荷、延長 PEM 壽命，並有助於吸入時維持更高的體內氫氣濃度。
- Normal 模式 (連續模式): 提供穩定流量與氣體輸出，適合進行持續電解作業。此模式氣流平順，適用於製備氫水或需要定量氣體輸出的情境。

聯繫客服 gaura.hydrogen@gmail.com